



Milian Baby légzésfigyelő készülék Használati útmutató

HU - Magyar

**Műszaki tanácsadás és szerviz:
+36 30 793 37 47
kapcsolat@milianbaby.hu**

Tartalomjegyzék:

3. oldal:

- Típusok, a doboz tartalma
 - A készülék funkciója
 - A készülék működése

4. oldal:

- Rendeltetésszerű használat
 - Figyelmeztetések

5. oldal:

- Korlátozások
 - Üzembe helyezés
- Üzembe helyezés utáni próba

7. oldal:

- Kijelzések
- Memória visszajátszása (Memory replay)

8. oldal:

- Elemfeszültség figyelés
 - Érzékelőlapok elhelyezési módjai
- Érzékelőlapok elhelyezési módjai **oldaltfektetés** esetén

10. oldal:

- Tépőzár felhelyezése

11. oldal:

- Vezetékrögztő alkalmazása
- Műszaki adatok, tisztítás, karbantartás

12. oldal:

- Információ az elemek biztonságos kezeléséhez
 - Gyártói megfelelőségi nyilatkozat



Kedves Szülő!

Köszönjük, hogy a Milian baby légzésfigyelő készüléket választotta!

A leggondosabb szülői felügyelet sem képes arra, amire a Milian légzésfigyelő: folyamatosan figyeli a gyermek minden rezdülését és még időben jelez, ha rendellenes mozgást, vagy mozgás hiányát észleli. Így a szülőnek lehetősége van beavatkozni, meg tudja akadályozni egy esetleg súlyos következményekkel járó folyamat kialakulását. A készülék jelez, ha baj van, de a szülői gondoskodást nem helyettesíti. A készülék nem életmentő berendezés – azonban **Ön és a Milian légzésfigyelő együtt életet menthet!**

Típusok, a doboz tartalma:

- **Milian Baby One:** MB-01 központi egység, **1 db 30x50 cm érzékelőlap**, 1 db vezetékrögzítő spirál, 2db „AA” ceruzaelem, 2 db tépőzár, Gyors üzembehelyezési útmutató, Használati útmutató, Jótállási jegy.

Megjegyzés: Elsősorban babafészek alá, bölcsőbe vagy babaöbölhöz ajánljuk a használatát.

- **Milian Baby Standard:** MB-01 központi egység, **2 db 30x50 cm érzékelőlap**, 2 db vezetékrögzítő spirál, 2db „AA” ceruzaelem, 2 db tépőzár, Gyors üzembehelyezési útmutató, Használati útmutató, Jótállási jegy.

Megjegyzés: 60x120 cm-es kiságyba javasoljuk a használatát.

- **Milian Baby Plus 3 db érzékelőlappal:** MB-01 központi egység, **3 db 30x50 cm érzékelőlap**, „Y” elosztó, 4 db vezetékrögzítő spirál, 2db „AA” ceruzaelem, 2 db tépőzár, Gyors üzembehelyezési útmutató, Használati útmutató, Jótállási jegy.

Megjegyzés: 60x140 cm-es kiságyba javasoljuk a használatát.

Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót, és csak az útmutatónak megfelelően használja a terméket! A készülékhez mellékelt "Gyors üzembehelyezési útmutató" elengedhetetlen rövid információkkal szolgál a készülék működését illetően, azonban a biztonságos használatához feltétlenül szükséges az alábbiak ismerete.

A készülék funkciója:

az egészséges csecsemő mozgásának figyelése. Rendellenes mozgás, vagy a mozgás hiányának észlelése esetén a szülő figyelmeztetése hangjelzéssel és rövid szöveges tájékoztatással.

A készülék működése:

A készülék érzékeli a csecsemő mozgását, egy vagy több érzékelőlappal. Az érzékelőlap(ok) jeleit folyamatosan elemzi, a mozgás erősségét kijelzi, szükség esetén beavatkozást kérő jelzést ad a szülőnek (hang, fény, szövegkiírás).

Az érzékelőlap(ok) elhelyezése történhet matrac alá, illetve matrac fölé is, a Használati útmutatónak megfelelően alkalmazva.

1. Alapfunkció: ha a mozgás erőssége nem éri el a beállított küszöbértéket 12 másodpercig, akkor a készülék 3 rövid hangjelzéssel próbálja a babát erőteljesebb mozgásra készíteni. Ha

ez nem sikerül, csak akkor következik a szülőnek szóló hangos jelzés. Az ilyen esetre felkészülve célszerű a gyermekorvosa tanácsát előzetesen kikérni.

2. Előfordulhat, hogy a baba túlságosan mélyen alszik, ezért ritkán vesz levegőt, de a mozgása még meghaladja a beállított küszöbértéket. Ez esetben a készülék az alapfunkció szerint nem adna semmilyen jelzést, hiszen a mozgás erőssége megfelelő. Azonban a MILIAN Baby légzésfigyelő követi a mozgás ütemét is, és ha az a percenkénti 10 periódust nem éri el, akkor külön erre szolgáló hangjelzéssel és kiírással jelez a szülőnek - SLOW (lassú). Ilyenkor célszerű kicsit megmozdítani a babát, hogy megszűnjön a lassú légzésvétel állapot.
3. Mély alváskor (esetleg oldalt fektetéskor) lehetséges, hogy a percenkénti légzésszám megfelelő, a jel erőssége a küszöbértéket is meghaladja, de a jelerősség folyamatosan alacsony, éppen csak átlépi a beállított küszöbértéket. Három perc ilyen állapot után a készülék erről is jelzést ad a szülőnek - WEAK (gyenge). Szintén a baba gyengéd megmozdításával lehet megszüntetni ezt az állapotot.

A baba mozgásainak folyamatos elemzésével a MILIAN légzésfigyelő még időben tud olyan jelzéseket adni a szülőnek, amelyek segítségével a nagyobb baj megelőzhető.

Rendeltetésszerű használat:

- Nem használható és nem alkalmas semmilyen betegség diagnosztizálására, gyógyítására, megelőzésére!
- A készülék nem alkalmas bölcsőhalál (SIDS) megelőzésére, mert az egy váratlanul bekövetkező, előzmény nélküli esemény. Az időben történő észlelésnek és a szülő felkészültségének azonban óriási szerepe van az újraélesztés sikerében.
- Nem orvostechnikai eszköz.
- Nem helyettesíti a szülői felügyeletet, felelősséget!
- Javasoljuk a babaelsősegély tanfolyam elvégzését!

Figyelmeztetések:

Az érzékelőlapok vezetékeit rögzítse a kiságyhoz úgy, hogy azt a gyermek ne érje el, ne tudja behúzni magához. Ebben segíthet a mellékelt spirális vezetékrögzítő. Ha a készülék központi egységét a kiságyhoz rögzíti, akkor használja a készülékhez adott erős tépőzárat. A központi egységet úgy helyezze fel a kiságyra, hogy azt gyermeke semmilyen körülmények között ne érhesse el. Az így felhelyezett központi egységet célszerű ágyrácsvédővel is eltakarni a gyermek elől. A központi egységet tilos letakarni, lefedni! Ne engedje a gyermeket játszani a készülékkel! Ne engedje, hogy egy nagyobb testvér kezelje a készüléket! A készülék megfelelő működtetése a szülő feladata és felelőssége!

FONTOS! IKER BABÁKHOZ SEMMIKÉPPEN NE HASZNÁLJA AZ EGYBABÁS ÜZEMMÓDOT! Ellenkező esetben a készülék nem különbözteti meg a két gyermeket, és téves jelzést fog adni!

FONTOS! IKERBABÁS ÜZEMMÓDHOZ MINIMUM 2 ÉRZÉKELŐLAP SZÜKSÉGES! A babákat külön kiságyban kell altatni! Egy kiságyban történő altatásnál kölcsönösen zavarják egymás mozgásérzékelését!

Korlátozások:

Mivel a készülék nagyon érzékeny mozgásfigyelő, ezért a használata közben ezzel kapcsolatban be kell tartani néhány fontos szabályt:

- Csökkentse minimálisra a környezetből eredő rezgéseket, mozgásokat! Ilyen például a ventilátor, levegőt mozgó klímaberendezés, léghuzat, lépésből eredő padlómozgás, nagyobb gyerekek a kiságy környezetében játszadozása, stb.
- Amennyiben babaöbölben használják a készüléket, a babaöböl nem érintkezhet a felnőttek ágyával, mert a felnőttek mozgása átadódhat!
- A kiságy nem lehet elérhető távolságban másik gyerek kiságyától, vagy a felnőttek ágyától.
- A készülék érzékenysége úgy van beállítva, hogy csecsemő és kisgyermek mozgását figyelje, ezért a légzésfigyelőt 2 éves kor után, vagy 20 kg-nál nagyobb súlyú gyermeknél ne használja!
- A készülék bármilyen, kereskedelmi forgalomban kapható, kiságyba helyezhető matracal használható.

Üzembe helyezés:

Olvassa el figyelmesen a készülékhez adott "Gyors üzembehelyezési útmutatót", és annak megfelelően járjon el!

Fontos, hogy a baba súlyának és a kiságy méreteinek megfelelően helyezze el az érzékelőlapokat. Ehhez segítséget nyújt a doboz hátoldalán levő fényképes elhelyezési segédlet, vagy a honlapunkon a "Dokumentumok" alatt található Telepítési útmutató (<https://milianbaby.hu/telepitesi-utmutato/>), illetve ez a Használati útmutató.

Általános szabály, hogy amíg nem mászkál el a gyermek álmában és a súlya meghaladja a 3,5 kg-ot, addig **egy** érzékelőlapot használjon a matrac alatt, a babával egy irányban elhelyezve. Ezzel az elhelyezéssel a baba teljes testhosszával az érzékelőlap felett lesz, így elkerülhető a melléfektetés. Ha majd elmászkál a baba a helyéről, akkor szükséges további érzékelőlap elhelyezése. Elmászkálás esetén a kiságyban keresztben célszerű elhelyezni az érzékelőlapokat, egymástól 5-15 cm távolságban.

Szintén fontos a téves riasztás elkerülése érdekében, hogy amíg a baba súlya **nem éri el a 3,5 kg-ot**, addig **egy** érzékelőlapot használjon, de ne a matrac alatt, hanem a matrac **felett** helyezze el azt. Ezzel a megoldással átmenetileg, amíg a baba súlya több nem lesz 3,5 kg-nál, kiiktatjuk a baba és az érzékelőlap közül a matracot a biztonságos érzékelés érdekében. A baba kényelme érdekében babapaplannal, vagy duplára hajtogatott puha pléddel takarja le az érzékelőlapot. Ha a baba súlya majd meghaladja a 3,5 kg-ot, akkor célszerű az érzékelőlapot a matrac alá helyezni.

Hasonlóan a matrac felett helyezze el az érzékelőlapokat, ha a babát **oldalt kell fektetni**, még akkor is, ha a súlya már több, mint 3,5 kg. Ez esetben ugyanis az alvás közben mozgást végző testrészek (has, mellkas) oldalirányban mozognak el, a gyerek ráadásul a karján fekszik, így sokkal kisebb mozgás adódik át a matrac és az érzékelőlap(ok) irányába.

Üzembe helyezés utáni próba:

Baba nélkül kapcsolja be készüléket (kb. 2 másodpercig kell nyomni a bekapcsoló gombot), majd figyelje a kijelzőt. Álljon kicsit távolabb, hogy mozgásával ne zavarja az érzékelést. Ilyenkor számkijelzés esetén a 0-1 érték kijelzése az elfogadható, grafikus kijelzés esetén pedig legfeljebb egy pontsor változás lehet.

A nyugalmi helyzet elérése után (**számkijelzésnél**: az először kijelzett, küszöbérték alatti szám, **grafikus kijelzésnél**: 3 másodpercig tartó küszöbérték alatti jel.) kb. 12 másodperc múlva sípol először egy rövidet a készülék, jelezve azt, hogy túl sokáig észlelt küszöbérték alatti mozgást. Ilyenkor, ha a gyerek mozgással reagál a hangra, akkor a készülék előlről kezdi a figyelési ciklust. Most a próbánál a gyerek helyett kicsit nyomja meg a matracot, hogy a figyelési ciklus újra elindul-e?

Három rövid hangjelzést ad a készülék akkor, ha nem kap mozgás visszajelzést, és csak azt követően indul be a riasztó jelzés, a nyugalmi állapot elérése után kb. 20 másodperccel. Ilyenkor a jelzést leállítani már csak a szülő tudja, egy rövid gombnyomással.

Ha sikeres volt a próba a baba nélkül, próbálja ki babával is. Ha ébren van a baba, akkor számkijelzés esetén átlagosan 8-9 érték a megfelelő, grafikus kijelzésnél pedig legalább az egyik érzékelőlap kijelzése a 6-7. pontsorra érje el a jel. Kettő vagy több érzékelőlap használata esetén előfordulhat, hogy a pontkijelzés, vagy oszlopkijelzés egyik oldala gyakran alacsony értéket jelez, míg a kijelző másik oldala szabályos mozgást mutat. Ez teljesen normális több érzékelőlap használatakor: a második érzékelőlap például gyakran a baba lába alatt helyezkedik el és annak apró mozdulatait észleli. Mivel a grafikus kijelzés pillanatnyi értéket mutat, ezért most a baba egyéb izommozgásai miatt egyenetlen jelet látunk, ami alvás közben egyre inkább egyenletes, periodikus jelleget vesz fel.

Amikor kiveszi a babát a kiságyból, az átmeneti nagy jelváltozás megszűnése után a készüléknek biztonsággal jeleznie kell a baba mozgásának megszűnését. Itt meg kell jegyezni, hogy vannak olyan matracok, amelyek a baba kivétele után, a súly megszűnése miatt sokáig, akár 10-20 másodpercig is utómozgást végeznek, amit a készülék mozgásnak érzékel. Szerencsére ez nem fordulhat elő valós helyzetben, amikor a baba a kiságyban van.

Abban az esetben, ha a baba nélküli tesztelés során azt tapasztalná, hogy nyugalmi helyzetben a készülék időnként, vagy folyamatosan magasabb értéket mutat, mint 0-1 (grafikus kijelzésnél 1-2 pontsorra), az azt jelenti, hogy valamilyen külső eredetű mozgást érzékel. Ennek eredetét derítse ki, és a zavaró mozgást próbálja megszüntetni, vagy csökkenteni!

Előfordulhat azonban, hogy a külső zavaró mozgás nem szüntethető meg, például erős utcai forgalom esetén. Ez esetben a mozgásérzékelés küszöbértékét kell 2 egységgel magasabbra állítani, mint a tapasztalt zavarás értéke. Például ha a zavarás értéke számkijelzés esetén 3, akkor az "L" küszöbértéket 5-re állítsa be. Ezt a készülék menüjében teheti meg, a "Gyors üzembehelyezési útmutató" szerint. Ezzel kiküszöböljük a külső eredetű zavar befolyását, azonban így kevésbé lesz érzékeny a készülék a baba mozgására is. Ezért szükség lehet az érzékelőlap matrac feletti elhelyezésére egészen addig, amíg a baba súlya meg nem haladja a 4 kg-ot.

A gyárilag beállított "L" = 3 küszöbértéket általában nem kell megváltoztatni a használat időtartama alatt, csak abban az esetben, ha a külső zavaró mozgások más módon nem szűrhetők ki.

FONTOS! CSAK INDOKOLT ESETBEN VÁLTOZTASSA MEG A GYÁRILAG BEÁLLÍTOTT "L=3" KÜSZÖBÉRTÉKET!

A fenti tesztelést ismételje meg akkor is, ha áthelyezi a készüléket, vagy a kiságyat. Ettől függetlenül hetente egyszer szintén célszerű elvégezni a tesztelést.

Kijelzések:

Hagyományos számkijelzés is használható, de beállíthatunk 3 különböző folyamatos grafikus kijelzést is. Ezáltal betekintést nyerhetünk a baba pillanatnyi alvásállapotába, nyugodtan alszik-e, vagy valami zavarja álmában. Grafikus kijelzést használva olyan plusz lényeges információhoz juthat a szülő, amit egyébként talán észre sem venne.

Az egyes kijelzési módokat a "Gyors üzembehelyezési útmutatóban" leírtak szerint, a menüből lehet beállítani.

D – (DISPLAY) - Különböző kijelzési lehetőségek közül választhat (amikor "D" van a kijelzőn, nyomja 2 mp-ig a gombot, majd rövid gombnyomásokra az alábbi lehetőségek váltakoznak):

1. **DOTS** - két-két fel-le mozgó pont jelzi a pillanatnyi mozgásértékeket. Kiválasztása hosszú gombnyomással. Ez a beállítás nagy pontossággal követi a baba pillanatnyi mozgását, ez a kijelzés energiatakarékos. Az érzékelőlapok mozgáskijelzése külön grafikus oszlopban történik, ezzel tovább növelve a mozgásfigyelés pontosságát. Például ha az egyik érzékelőlap a baba felsőteste alatt van, a másik pedig a baba lábánál, akkor külön láthatjuk a légzés ritmusát, illetve a baba lábának apró rezdüléseit alvás közben. Egészen más jeleket láthatunk, ha nyugodtan alszik a baba, és mást, amikor valamiért nyugtalan az alvása.

2. **COLS** - két fel-le mozgó teli oszlop jelzi a pillanatnyi mozgásértékeket. Kiválasztása hosszú gombnyomással. Hasonlóan a DOTS kijelzéshez, ez a beállítás is nagy pontossággal követi a baba pillanatnyi mozgását. Látványos, de kevésbé energiatakarékos.

3. **NUMS** - 3 másodpercenként számkijelzés mutatja az érzékelt legnagyobb mozgásértéket. Kiválasztása hosszú gombnyomással. Ez a hagyományosnak mondható kijelzés elegendő akkor, ha nem vagyunk kíváncsiak az alvás minőségére, csak a mozgás erősségére.

4. **GRAF** – valós idejű grafikus görbe. Kiválasztása hosszú gombnyomással. Ez a kijelzés ikres üzemmódban nem elérhető! Hasonló a DOTS és COLS grafikus kijelzéshez, de a kijelzőn csak a nagyobb mozgásértéket adó érzékelőlap kerül megjelenítésre, időben elnyújtott ábrázolással.

M - (MEMORY REPLAY - Memória visszajátszása) - A "Gyors üzembehelyezési útmutatóban" leírtak szerint, menüből lehet elérni. Visszanézhetők a legutóbbi 12 perc kijelzései (ikres üzemmódban 6 perc). A visszanézés számkijelzéssel történik abban az esetben is, ha egyébként a kijelzéshez grafikus mód volt beállítva.

A memóriában rögzített adatok visszanézésére akkor lehet szükség, ha például volt egy riasztás, de a baba jól van. Ez esetben nem egyértelmű, hogy valódi, vagy téves riasztás volt-e? Ennek eldöntéséhez nyújthat segítséget a riasztás előtti 12 perc adatainak visszanézése.

A visszajátszás 1 perces lépésekben történik, a 13. perctől visszafelé időben. Ezért az első kijelzés R13M (Replay 13 Minutes), majd elkezdődik a 12. percnél visszajátszása, az eredeti kijelzési ütem 3x felgyorsítva. Ha még új a készülék, és nincs 12 percnyi adat a memóriában rögzítve, akkor a készülék beáll a ténylegesen rögzített adatok elejére, például R5M jelzéssel, ami 5 perc visszajátszást jelent.

Ha nem kívánja mind a 12 percet végignézni, akkor rövid gombnyomással a következő perc elejére léphet. A kijelzőn "J" (Jump) jelenik meg egy pillanatra.

Lejátszás közben a kijelzőn "X" a készülék ki- és bekapcsolását jelöli, "S" (Slow) esetén lassú légzésvételt, "W" (Weak) esetén alacsony intenzitású légzésvételt jelenti.

Ha meg akarja szakítani a lejátszást, akkor hosszan nyomja meg a gombot. "Q" (Quit) kiírása után a befejeződik a memória visszajátszása, a készülék leáll.

Egy megtörtént riasztás előtti adatok fontosak lehetnek, ezért ezek az adatok a következő bekapcsolással nem íródnak fölül automatikusan! A készülék bekapcsolását követően MEM OFF kiírással jelzi, hogy a memória írása ideiglenesen ki van kapcsolva. Három bekapcsolásig őrződnek meg az adatok, csak a negyedik bekapcsolást követően kezdődik újra a memória feltöltése új adatokkal. Természetesen nem szükséges kivárni a 3 bekapcsolást, ha a „MEM OFF” kiírása közben hosszan megnyomja a gombot, akkor elkezdődik a memória feltöltése új adatokkal, miközben a régi törlődik.

További, kijelzéssel kapcsolatos információk és beállítások a "Gyors üzembehelyezési útmutatóban" találhatók.

Elemfeszültség figyelés:

A készülék megfelelő működéséhez elengedhetetlen, hogy az elemek megfelelő állapotban legyenek. Ezért különösen fontos, hogy az elemcsere időben megtörténjen akkor, amikor a készülék jelzi az elemek lemerülését.

Ugyanakkor elvárás, hogy a készülék ne bekapcsoláskor (amikor a baba éppen elaludt), vagy éjszaka működés közben jelezzen elemcsere miatt.


Az elemfigyelés úgy van beállítva, ha bekapcsoláskor a készülék megfelelőnek értékeli az elemek állapotát, akkor az elemek a következő 12 órában biztosítani tudják a légzésfigyelő működését.

A kikapcsolási folyamatban a készülék ismét ellenőrzi az elemek állapotát, és ha az közelít a nem megfelelő értékhez ($<2,8V$), akkor hanggal és elem-ábra villogtatással jelzi. Ilyenkor elemet kell cserélni! Ha ez nem történik meg, akkor a jelzés megismétlődik a következő **bekapcsoláskor is**. Ha időközben annyira lemerült volna az elem ($<2,7V$), ami már a biztonságos működést veszélyezteti, akkor nem lehet bekapcsolni a készüléket, feltétlenül elemcserére van szükség.

Ezzel az összetett elemfigyeléssel elkerülhető a baba nyugalmát megzavaró elemállapot jelzés, mert csak kikapcsoláskor van figyelmeztető hang, amikor a baba már feltehetően felébredt. Ha ezt követően megtörténik a szükséges elemcsere, ez esetben a következő bekapcsolás hangjelzés nélkül történik meg.


Érzékelőlapok elhelyezési módjai a kiságy felülnézeti rajzával:

Amennyiben a baba súlya **nem éri el a 3500 grammot**, 1 érzékelőlapot kell a matracon elhelyezni hosszanti irányban. Az érzékelőlapot és a vezetéket egy lepedővel takarja le, majd a baba kényelme érdekében helyezzen a baba alá babapaplant. A baba az érzékelőlap felett legyen elhelyezve úgy, hogy a hasi, mellkasi része a lap közepe táján legyen:

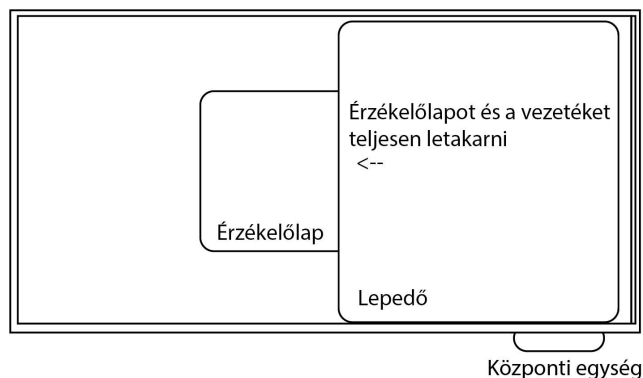


Hasonlóan a matrac felett helyezze el az érzékelőlapokat, ha a babát **oldalt kell fektetni**, még akkor is, ha a súlya már több, mint 3,5 kg.

Miután a baba súlya **eléri és meghaladja a 3500 grammot**, 1 érzékelőlapot kell az ágyrács és a matrac közé helyezni, amíg a baba nem mászkál el a helyéről. A baba az érzékelőlap felett legyen elhelyezve úgy, hogy a hasi, mellkasi része a lap közepe táján legyen:

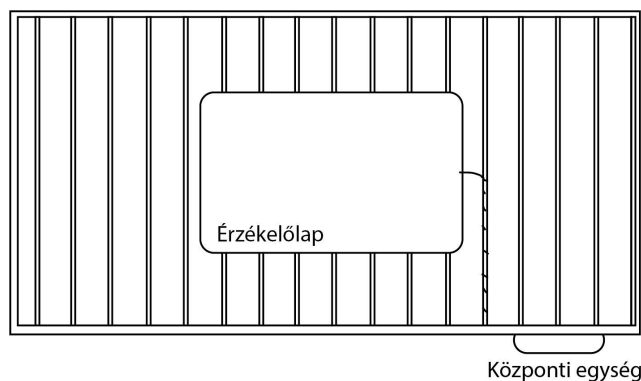


3500 gramm felett - amennyiben a baba **már elmászkál** a helyéről - az érzékelőlapokat az alábbi ábra szerint kell elhelyezni:

60X120 centiméteres kiságyhoz ideális elrendezés **2** érzékelőlappal:

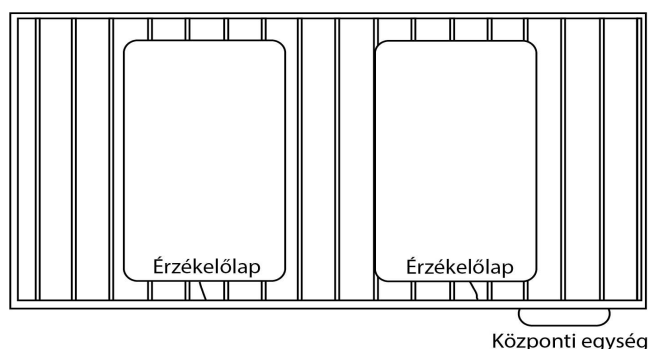


60X140 centiméteres kiságyhoz ideális elrendezés **3** érzékelőlappal, „Y” elosztóval.

Azt az érzékelőlapot helyezze középre, amelyik közvetlenül csatlakozik a központi egységhez.

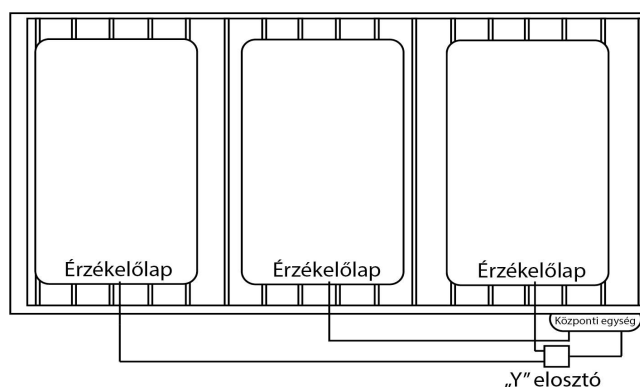


Ikerbabás elrendezés 1-1, illetve 2-2 érzékelőlappal. A két kiságy között legalább 30 cm távolságnak kell lennie:

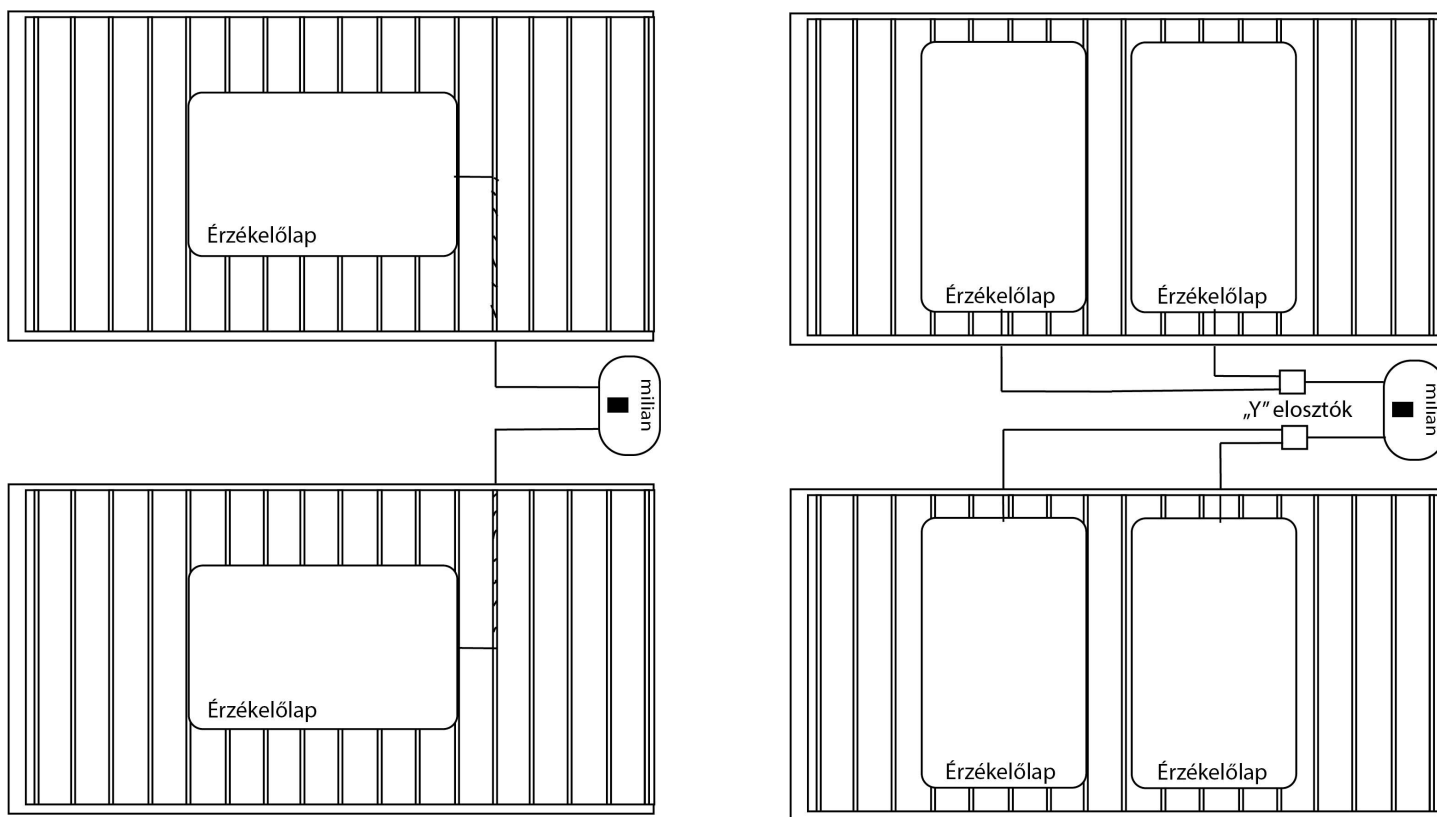

Megjegyzés: ikerbabás használat során szükséges lehet átmenetileg egybabás módra kapcsolni, például ha az egyik baba alszik még, a másik babát közben etetni kell. Ilyenkor nem kell a menübe belépni és ott átkapcsolni egybabásra, elegendő ha nyomva tartja a bekapcsoló gombot (2 sec). A készülék rajzolt nyíllal és X jellel felkínálja először a baloldali kiságy, utána a jobboldali kiságy figyelmen kívül hagyását. Amelyik megjelenésekor a gombot elengedi, az az ágy nem lesz figyelve, és riasztás sem lesz miatta! Erre az állapotra a kijelző folyamatosan, jól láthatóan felhívja a figyelmet az alábbi jelekkel: <-x vagy x->. Amerre a nyíl mutat, az az ágy nincs figyelve, és riasztás sem lesz miatta!


Tépőzár felhelyezése:

A készülék csomagolása tartalmaz 2 db erős, öntapadó tépőzárát, melynek segítségével a készüléket rögzítheti a kiságyhoz. Az egyiket ragassza fel a kiságyra a kívánt helyre (a megfelelő tapadáshoz tiszta, zsírmentes felület szükséges). A tépőzár másik felét ragassza a készülék hátuljára az alábbi ábra szerint:

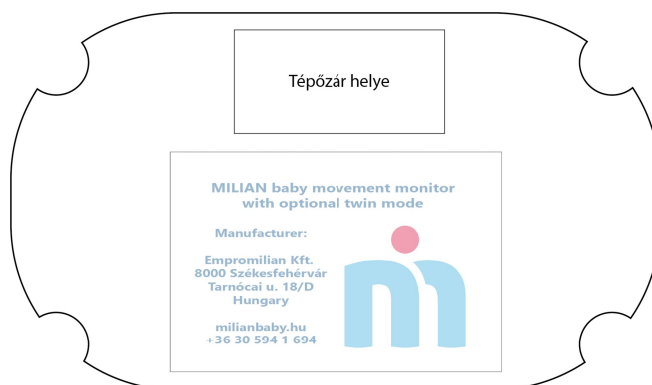

Vezetékrögzítő alkalmazása:

A készülék csomagolása tartalmaz vezétkrögzítő spirál(oka)t, melyeket az alábbi ábra szerint kell felhelyezni a kiságy függőleges rácsára, odafoogatva azzal a vezetékeket. Amennyiben szükséges, a vezetékeket is tekerje rá néhányszor az ágyrácsra.

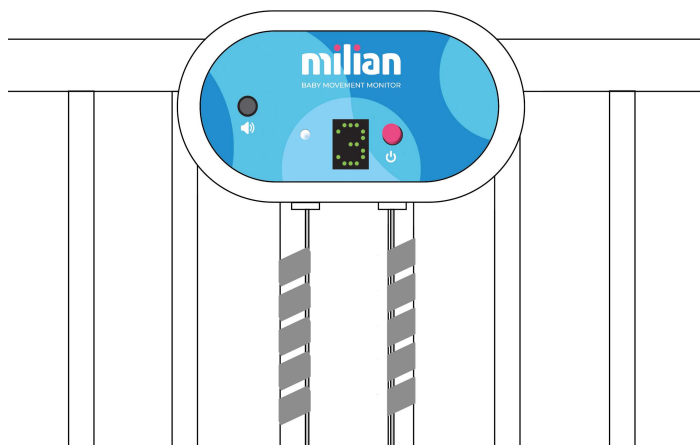

Műszaki adatok, tisztítás, karbantartás:

A központi egység áramfelvétele 0,3-0,5 mA, a kijelzés típusától függően.
Elemek várható élettartama kb. 2000-3000 üzemóra, 1500 mAh kapacitású alkáli elemet feltételezve.

Kétfokozatú elemfeszültség kijelzés: előjelzés, biztonsági tiltás.

A kijelző típusa: 5×7 pontmátrix, zöld.

A hangjelző típusa: piezoelektromos, 75-80 dB hangerejű.

Mivel a készülék elemfigyelése 2 db 1,5 V-os "AA" alkáli elemhez van beállítva, **ettől eltérő típusú elem, vagy tölthető elem nem használható** a különböző feszültség miatt.

A készülék elektromos zajkibocsátása (elektroszmog) gyakorlatilag nem mérhető.

A készülék ikerbabás üzemmódban is használható, a Használati útmutatóban leírtakat betartva.

Terhelhetőség: 20 kg, ha az érzékelőlapok a matrac alatt egyenletesen vannak elosztva. Matrac feletti érzékelőlap elhelyezésénél legfeljebb 10 kg a terhelhetőség, érzékelőlaponként.

A felhasznált műanyagok egészségügyben is használatosak (PVC, polikarbonát), oldószert nem bocsátanak ki, alkalmazásuk veszélytelen. Az érzékelőlapok csepegő víztől védettek. Nedves, szappanos törölkendővel tisztíthatók, egészségügyben használatos lemosó fertőtlenítő szerekkel fertőtleníthetők. A központi egység víztől nem védett, tisztítása nedves törölkűhával, az érzékelőlapokhoz használatos anyagokkal történhet. A központi egységet szennyeződés esetén, az érzékelőlapokat szennyeződés esetén, de legalább hetente ajánlott tisztítani. Tisztításon kívül a készülék egyéb karbantartást nem igényel.

Minden használat előtt javasolt a készülék, az érzékelőlapok és vezetékek állapotának vizuális ellenőrzése. Probléma, meghibásodás esetén lépjen kapcsolatba a készülék gyártójával, vagy forgalmazójával!

Útmutató az elemek behelyezéséhez a „Gyors üzembehelyezési útmutató”-ban található.

Információ az elemek biztonságos kezeléséhez:

- Soha ne használjon újratölthető elemeket!
- Soha ne használjon szén-cink elemeket!
- Ne használjon együtt új és használt elemeket.
- Ne próbálja feltölteni a nem tölthető elemeket.
- Az elemeket a pólusokkal megfelelő irányba kell behelyezni.
- A lemerült elemeket vegye ki a készülékből, és kezelje megfelelően.
- Csak hasonló vagy ugyanolyan elemek használata ajánlott.
- Az elemek behelyezését vagy cseréjét csak felnőtt végezheti.
- Bizonyosodjon meg arról, hogy a használt elemek nem kerülhetnek gyerek kezébe, és helyezze az erre a célra kijelölt hulladékgyűjtőbe.
- Tartós használaton kívül helyezés esetén az elemeket vegye ki a készülékből!
- Amennyiben a készüléket már nem használja, a jogszabályoknak megfelelő hulladékgyűjtőbe helyezze.
- A készülék 10 °C és 35 °C közötti hőmérsékleten használható, max. 90% páratartalom mellett.

Gyártói Megfelelőségi Nyilatkozat

Gyártó neve:

Empromilian Kft.

8000 Székesfehérvár Budai út 14.

A gyártó ezúton nyilatkozik, hogy a lent megnevezett készülékek CE nemzetközi jelzéssel vannak ellátva. A termékek megfelelnek a forgalmazásához szükséges nemzetközi és magyar szabványelőírásoknak és irányelveknek. Az adott termék pontos típusa és sorszáma a készülékhez mellékelt garanciajegyen található.

A termék megnevezése: Milian baby mozgásfigyelő készülékcsalád

Típusai:

- Milian One
- Milian Standard
- Milian Plus

Az EU megfelelőségi nyilatkozatot kérje a gyártótól.



Varga Dávid
ügyvezető

Székesfehérvár, 2022.01.03.