

Angelcare®

Model AC300

Movement Monitor

Légzésfigyelő készülék



TARTALOMJEGYZÉK


4 Egyszerű lépés az Angelcare® légzésfigyelő használatához	7
Biztonsági előírások	7
Használati útmutató	7
Angelcare® légzésfigyelő tesztelése	8
Érzékenység beállítása	8
Problémamegoldások	8
Garancia	9

FONTOS TUDNIVALOK

ANGELCARE LÉGZÉSFIGYELŐ KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA 2 ÉRZÉKELŐ TÁBLÁVAL


Kapcsolja össze a két érzékelő táblát a rövidebb kábellel. Helyezze el az érzékelő táblákat úgy, ahogy az alábbi kép mutatja. Ha mózeskosarat, vagy kicsi gyerekágyat használ, akkor tegyen csak 1 érzékelő padot 2 kábellel a kiságy közepére a matrac alá. Dugja az érzékelő tábla hosszú kábelét a Gyermekőrző Egységbe. Az érzékelő tábla nyomtatott oldala KELL felfelé legyen. NE tegyen vastag ágyneműt a matrac sarkai alá.

Az érzékelő táblák helyzete a matrac alatt

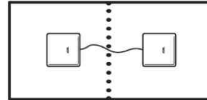

Kiságy közepe

A Helyes

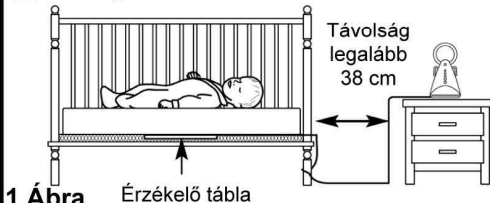


B Helytelen



3 Ábra


Tic
Be/Kikapc
soló gomb

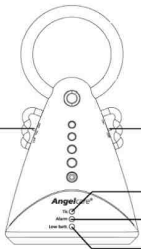

Előlnézet

Be/Kikapcsoló

Tic visszajelző
Riasztás visszajelző
Elem-gyengeség
visszajelző

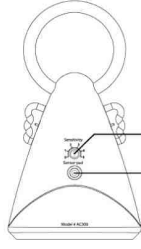

Hátulnézet

Erősség
szabályozó

Érzékelő
tábla
csatlakozó

4 Ábra



Érzékelő tábla

4 EGYSZERŰ LÉPÉS AZ ANGELCARE® LÉGZÉSFIGYELŐ HASZNÁLATÁHOZ

1. ÉRZÉKELŐ TÁBLA

Helyezze el az érzékelő táblát az 1. és 2. ábra szerint. Az érzékelő táblát nyomtatott felével felfelé helyezze el. A matrac és az érzékelő tábla között NEM lehet sem ágynemű, sem takaró. Az Angelcare készülékek bármilyen szabvány kiságymatracal használhatóak 12 cm vastagságig (kókuszmatracal is).

Az érzékelő táblát tökéletesen sík és kemény felületre kell fektetni. Ha a kiságy rugalmas, vagy egyenetlen aljú (pl. rugós), akkor tegyen egy 6 mm vastagságú kemény lapot a kiságyba az érzékelő tábla alá. Ügyeljen arra, hogy a matrac ne szoruljon a kiságyban, mert ez a matrac szabad mozgását akadályozza, mely ronthatja az érzékelést.

2. RIASZTÓ ADÓ

- Tegyen két AA elemet a riasztó adó elemtartó rekeszébe.
- Csatlakoztassa az érzékelő tábla kábelét az adóhoz (3 ábra)
- A riasztó adó oldalán a Tic kapcsoló segítségével válasszon a két funkció közül egyet, aszerint hogy, hogyan kívánja a készüléket használni:

"Tic" On: a gyermek minden egyes lélegzetvételét nemcsak a zöld led villogása, hanem ezzel együtt egy kattogó "Tic" hang is jelzi.

"Tic" Off: Ugyanaz, mint az előző, DE "Tic" hang nélkül.

MEGJEGYZÉS: Az érzékenység a gyártó által be van állítva. NE NÖVELJE EZT, CSAK HA SZÜKSÉGES. Ha gyengén érzékeli a mozgást (piros villogó fény) vagy téves riasztás fordul elő, akkor kövesse az érzékenység beállítása fejezetben leírtakat.

3. A LÉGZÉSFIGYELŐ HASZNÁLATA

Tegye a gyermeket a kiságyba, és kapcsolja be (ON) a készüléket. Ha kiveszi a babát a kiságyból, a légzésfigyelőt kapcsolja ki (OFF). Ha elfelejti kikapcsolni, akkor 15 mp múlva "előriasztás"-t hall, egy kattogást, figyelmeztetésként.

4. ELEMES ÜZEMMÓD

Az Angelcare® Légzésfigyelő készülék elemmel működik. Ha az elemek már gyengék, akkor a gyenge elemek lámpa világít, és a készülék gyors kattogó hangot ad. Ebben az esetben azonnal cserélje ki az elemeket.

MEGJEGYZÉS:

- Tesztelje az Angelcare® légzésfigyelőt az első használat **ELŐTT**, majd rendszeres időközönként ismételje ezt meg.
- Amikor a légzésfigyelő be van kapcsolva, akkor NE használjon olyan más kiságy tartozékot, amely vibrációt okozhat. A légzésfigyelő nem riaszt, ha bármilyen mozgást érzékel.
- Az Angelcare® légzésfigyelő teljesen biztonságos. Az érzékelő táblák és a kábelek teljesen passzívak. Nem hordoznak semmiféle elektromos áramot, és nem sugároznak semmiféle energiát.
- A légzésfigyelő bármilyen kiságyban, vagy alvási területen használható (ahol nincs más mozgás vagy vibráció), hogy biztonságban tarthassa a babát.

Biztonsági előírások

- Ez a termék NEM orvosi berendezés, és nem tud orvosi segítséget nyújtani a hirtelen bőlcsőhalál (SIDS) bekövetkezése esetén.
- Ez a termék NEM pótolja a baba közvetlen felügyeletét. Magától értetődően Önnek rendszeresen meg kell néznie gyermekét. Amennyiben gyermeke a "veszélyeztetett" kategóriába tartozik, ahol magasabb a kockázat a hirtelen bőlcsőhalálra, úgy okvetlenül konzultáljon kezelőorvosával az esetleges kiegészítő ellenőrző műszerek szükségességéről.
- Az érzékelő táblák tévesen mozgást jelezhetnek más, a gerekszóban, vagy azon kívül előforduló mozgások miatt, mint pl. erős huzat, ventilátor, mosógép, hangos zene, stb Győződjön meg, hogy minden vibrációs forrást felszámolt az Angelcare® Légzésfigyelő használata előtt. Kerülje az érintkezést a kiságygal, ha a légzésfigyelő be van kapcsolva. Lásd az Érzékenység beállítása és Problémamegoldás c. fejezetekben.
- MINDIG függőlegesen, sík felületen helyezze el a riasztó adót, úgy, hogy a gyermek ne érhesse el.
- NE érintse meg az adapter kábel végét, ha az be van dugva a konnektorba.
- Meghibásodás vagy egyéb kérdés esetén forduljon az importőrhez, (lásd. Forgalmazók / Distributors).

Használati útmutató

Feltétlenül őrizze meg ezt a használati útmutatást!

Minden egységet tartson távol a víztől (fürdőkád, medence) és a hőtől radiátor. A riasztó adót MINDIG függőlegesen, sík felületen helyezze el úgy, hogy a levegő szabadon áramolhasson körülötte.

Ne rongálja meg a kábeleket, és ne hosszabbítsa meg az érzékelő táblák kábeleit. A kábelek elég hosszúak ahhoz, hogy a gyermektől távol biztonságosan elhelyezhesse a készüléket.

TISZTÍTÁS: Kapcsolja szét a légzésfigyelőt tisztítás előtt NE mártsa vízbe! Használjon száraz rongyot a portalanításhoz. NE használjon oldószeres, vagy tisztítóspray-t. Az érzékelő táblákat kissé benedvesített, fertőtlenítőszeres, vagy enyhe mosószeres ruhával törölje le.

Gondoskodjon róla, hogy tárgyak ne eshessenek a készülékre, vagy folyadék ne kerülhessen se a riasztó adóba, se az érzékelő táblákra.

Használaton kívül: Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, akkor az elemeket vegye ki a riasztó adóból.

Az Angelcare® Légzésfigyelő tesztelése

MEGJEGYZÉS: Tesztelje az Angelcare® légzésfigyelőt az első használat **ELŐTT**, majd rendszeres időközönként ismételje ezt meg.

Az Angelcare® légzésfigyelő használható kiságyon kívül is, különböző alvási területeken. Tesztelje a légzésfigyelőt, ha az érzékelő táblákat áthelyezi, hogy az érzékenység megfelelően van-e beállítva az új matrachoz, (lásd. Az Érzékenység beállítása c. Fejezetet)

1. Kapcsolja be a légzésfigyelőt és a "Tic" funkciót. Finoman tegye a kezét a matracra. A zöld fény folyamatosan villogni fog minden egyes mozdulatra. Vegye el a kezét a matracról. Ha nincs mozgás, 15 mp után megszűn az előriasztás egy kattogó "Tic" hanggal, majd 5 másodperccel később riaszt a készülék és a piros lámpa folyamatosan villogni fog.


MEGJEGYZÉS: Ha nincs riasztás, az érzékelő táblák folyamatosan vibrációt érzékelhetnek vagy a padlótól, vagy attól, hogy a kiságyat megérintette. Kerülje az érintkezést a kiságygal, ha a légzésfigyelő működik. Tegye a kiságyat a fal mellé, távol az erős légáramlatoktól. Előfordulhat, hogy a készülék érzékenységét csökkenteni kell, lásd az Érzékenység beállítása c. fejezetet.

2. Hogy a riasztást leállítsa, tegye a kezét a matracra, hogy az érzékelő táblákat újra mozgásba hozza. A piros riasztást jelző fény még egy percig villogni fog. (3. ábra).

3. Ha a gyenge elemeket jelző fény bekapcsol, és gyors kattogó hangot hall, az elemeket sürgősen ki kell cserélni.

Érzékenység beállítása

Az érzékenység a leggyakoribb állapotnak megfelelően előre be van állítva. Bizonyos körülmények között előfordulhat, hogy ez a beállítás nem az ideális. NE növelje az érzékenységet, hacsak nem fordul elő téves riasztás, és akkor kövesse a Probléma-megoldás c. fejezetben leírtakat. Jegyezze meg az előre beállított érzékenységi fokot, hogy vissza tudja állítani, ha szükséges.

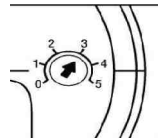

A riasztást jelző fény pirosan villog, ha a készülék gyengén érzékeli a mozgást. Ez a következők miatt fordulhat elő: a baba nagyon mélyen alszik, vagy elmozdult a kiságy széléhez. Ha **NINCS** riasztás, akkor ne növelje az érzékenységet. Ha a riasztást jelző fény legtöbbször pirosan villog, bár a baba az érzékelő táblákon fekszik, az téves riasztást okozhat. Ha ez bekövetkezik, akkor növelje az érzékenységet.

Az érzékenység növeléséhez állítsa az érzékenység szabályozóját a következő, magasabb fokozatra. Tesztelje újra a légzésfigyelőt.

HIBAELEHÁRÍTÁS. PROBLÉMA MEGOLDÁS

HIBA	LEHETSÉGES OKOK	MEGOLDÁSOK
Téves riasztás	• A babát kivette az ágyból, de nem kapcsolta ki a készüléket. • Az érzékelő táblák kábele nem csatlakozik jól a riasztó adóhoz. • Az érzékelő táblák nem érintkeznek helyesen a matraccal, vagy a kiságyamatrac nem teljesen kemény és sík felületen fekszik. • A baba elmozdult az érzékelő táblákról a kiságy széléhez.	• Kapcsolja ki a légzésfigyelőt. • Ellenőrizze a csatlakozásokat az érzékelő táblák és a riasztó adó között. • Győződjön meg róla, hogy nincs semmiféle ágynemű az érzékelő tábla és a matrac között. Ha a matrac szorul alakítsák a szélénél méretre, hogy könnyen mozogjon. Ha a táblák rugalmas, vagy egyenetlen felületen fekszenek, akkor tegyen egy 6mm vastag lapot az érzékelő táblák alá. • Győződjön meg róla, hogy a táblák az előírt módon vannak elhelyezve. Szükséges lehet az érzékenység növelése (lásd az Érzékenység beállítása c. fejezetet)
Nincs riasztás	• A légzésfigyelő mozgást érzékel, ha megérinti a kiságyat. • A légzésfigyelő a kiságyon kívülről érzékel mozgást (pl. mozgó eszköz, erős zajok, stb.) • Az érzékenység túl magas.	• Kerülje az érintkezést a kiságygal, ha a légzésfigyelő be van kapcsolva • Állítsa a kiságyat a fal mellé, hogy elkerülje a kiságyon kívüli mozgásokat. • Szükséges lehet az érzékenység csökkentése (lásd az Érzékenység beállítása c. fejezetet).
A riasztást jelző fény pirosan villog	• Az érzékelő táblák nem érintkeznek helyesen a matraccal, vagy a kiságyamatrac nem teljesen kemény és sík felületen fekszik. • A baba nagyon mélyen alszik, vagy elmozdult az érzékelő táblákról a kiságy széléhez.	• Győződjön meg róla, hogy nincs semmiféle ágynemű az érzékelő tábla és a matrac között. Ha a matrac szorul alakítsák a szélénél méretre, hogy könnyen mozogjon. Ha a táblák rugalmas, vagy egyenetlen felületen fekszenek, akkor tegyen egy 6mm vastag lapot az érzékelő táblák alá. • Győződjön meg róla, hogy a táblák az előírt módon vannak elhelyezve. Szükséges lehet az érzékenység növelése (lásd az Érzékenység beállítása c. fejezetet)
Nem működik	• Az elemek gyengék, vagy nincsenek jól betéve (a gyenge elemeket jelző fény bekapcsol) • A légzésfigyelő nincs bekapcsolva.	• Ellenőrizze, vagy cserélje ki az elemeket. • Ellenőrizze a csatlakozásokat, vagy cseréljen konnektort. • Győződjön meg róla, hogy a légzésfigyelő be van kapcsolva.

GARANCIA

A termék garanciális feltételére vonatkozó előírások a mindenkor magyarországi hatályos törvények szerint érvényesek. Ez a garancia nem vonatkozik az olyan termékekre, amely javítási kísérlet, fizikai behatás, rossz feszültség, helytelen alkalmazás, vagy használat miatt sérült meg. A garancia szintén nem vonatkozik arra az esetre, ha a tulajdonos javította a készüléket, vagy alakította át. Az ANGELCARE® és a magyarországi importőr és forgalmazók a termék használata kapcsán az ebből adódó esetleges következményekért semminemű felelősséget nem vállalnak.

Az ANGELCARE® légzésfigyelő egy személyi gondoskodó készülék, ami NEM nélkülözi a gyermekekről való személyes gondoskodást és felelősséget!!!

Amennyiben a készülék használatával kapcsolatban bármiféle kérdése, vagy észrevétele van, ezt jelezheti a kereskedőjénél, vagy a termék magyarországi forgalmazójánál a lenti elérhetőségeken. A termék a precíziós alkatrészek miatt nem javítható. Amennyiben a készülékkel kapcsolatban problémája van, ezt az importőr elérhetőségén jelezze, és amennyiben szükséges a garanciális időn belül a termékét, vagy annak főszegységét cseréljük. Garanciális időn túli meghibásodás esetén a termékhez földarabot biztosítunk.

INFORMÁCIÓ FELHASZNÁLÓKNAK

Ez a készülék megfelel a nemzetközi FCC Szabályok 15.fejezetében leírtaknak. Ezek alapján a termék működése a következő 2 feltételnek tesz eleget:

1 Ez a készülék nem okozhat ártalmas interferenciát.

2.Ennek a készüléknek el kell fogadnia az elismert interferenciákat, azokat is amelyek nem a kívánt működést eredményezik.

Ezt a készüléket úgy tervezték és fejlesztették, hogy megfeleljen a "B" Osztályú Digitális Készülékek feltételeinek, az FCC szabályok 15.fejezete szerint. Ezen feltételek biztosítják a megfelelő védelmet a káros interferenciákkal szemben a lakossági felhasználásnál. Ez a készülék rádió-frekvencia energiát fejleszt és sugároz, ezért ha nem az előírásoknak megfelelően használják, akkor káros interferenciát (vételi zavart) okozhat a rádiókommunikációban. Ha a készülék zavaró interferenciát okoz rádió-, vagy televízió vételben,- amely véget ér a készülék ki/be kapcsolásával, akkor próbálja kiküszöbölni ezt az interferenciát a következő teendők valamelyikével:

- Felhajtani, vagy áthelyezni a vevőantennát.
- Növelje a távolságot a készülék és a légzésfigyelő egységei között.
- Dugja a készüléket egy másik áramkörön lévő konnektorba.

TECHNIKAI ADATOK

ANGELCARE® termékek funkciója: az alvó gyermek légzésfunkcióit érzékelő készülék.

Érzékelő táblák

Funkciójuk: piezoelektromos érzékelő a gyermek mozgásának érzékelésére az egész fekvő felületen a matracon keresztül.

Összekötő kábel

3,5 méter hosszúságú csatlakozóval ellátott összekötő kábel, mely a Gyermekekörző-egység csatlakozó aljzatához kapcsolódik.

ADÓ

Feszültségellátás: 2db AA alkáli elemről (LR6).

Tisztelt Vásárló !

Köszönjük, hogy az ANGELCARE® termékét választotta. Az ANGELCARE® a termékek fejlesztése és gyártása során a legnagyobb gondossággal jár el, valamennyi terméke megfelel a nemzetközi szabványoknak. A cég termékeire a világon mindenütt 12 hónap garanciát vállal, mely a vásárlás napjától számítva él. A vásárlás napján kapott számlát, vagy fizetési blokkot és/vagy a készülék bélyegzett jótállási jegyét okvetlenül őrizze meg, mert jótállási igényét ezekkel érvényesítheti. A jótállás időtartama alatt minden olyan hiba esetén, amelynek eredete gyártási hibára vagy anyaghibára vezethető vissza, a termék fődarabját, vagy a terméket díjmentesen cseréljük. A légzésfigyelő készülékek utólagos javítását a gyártó a készülék életmentő jellege miatt nem engedélyezi. A csere időtartama a bejelentéstől (termék beérkezésétől) számított 8 nap.

Ez a jótállás nem vonatkozik az olyan termékre, amely javítási kísérlet, fizikai behatás, rossz feszültség, helytelen alkalmazás, vagy használat miatt sérült meg. A garancia szintén nem vonatkozik arra az esetre, ha a tulajdonos javította a készüléket, vagy alakította át.

Meghibásodás esetén a termék cseréjét 3 munkanapon belül az eladó szerv, ezt meghaladón az importőr végzi, kérjük utóbbi esetben ezt okvetlenül jelezze a megadott elérhetőségeken: (info@angelcare.hu)

Importőr és szerviz: Isd. Forgalmazók / Distributors

JÓTÁLLÁSI JEGY

A fogyasztói szerződés keretében vásárolt új tartós fogyasztási cikkre a 151/2003 (IX.22.) Korm. Rendelet alapján

1. A jótállási jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül. (Fogyasztó: a gazdasági vagy szakmai tevékenységi körén kívül eső célból szerződést kötő személy- Ptk.685 § d.pont). Amennyiben a fogyasztó bemutatja az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot, úgy a fogyasztói szerződés megkötését bizonyítottanak kell tekinteni a 49/2003.(VII.30.) GKM rendelet 2.§ alapján.
2. A jótállási határidő a fogyasztási cikk a fogyasztó részére történő átadás napjával kezdődik. A termék, vagy jelentős részének cseréje esetén a jótállás a jelentős részre újra kezdődik.
3. Kérjük a készülék használatba vétele előtt feltétlenül olvassa a kezelési útmutatót.
4. Kérjük, hogy a jótállási jegy forgalmazóra vonatkozó adatait töltesse ki a forgalmazóval.
5. Ez a készülék kizárólag háztartásban, háztartási célra használható.
6. A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető.
7. A jótállási kötelezettség teljesítése az importőrt terheli.
8. A fogyasztó a jótállás iránti igényét a forgalmazónál (importőrnél) is érvényesítheti.
9. A készüléket meghibásodás esetén az importőrhez kell eljuttatni, személyesen, vagy postai úton, a jótállási jeggyel együtt. A forgalmazó a feladott készüléket átveszi, feltéve ha a fogyasztó a küldeményről és a meghibásodásról előzetesen tájékoztatta.
10. Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól számított 3 munkanapon belül meghibásodik, a forgalmazó a fogyasztó kívánságára köteles azt kicserélni.
11. A fogyasztó jótálláson és szavatosságon alapuló jogait a következő jogszabályok és rendeletek szabályozzák: 151/2003 (IX.22) Korm.Rend.; Ptk.685 § e.pont; Ptk. 305 §-311/A-ig; 49/2003 (VII.30) GKM Rend. Hibás teljesítés miatt a fogyasztónak joga van áruszállítást kérni, illetve el is állnia a szerződéstől.
12. Szavatossági igényt a forgalmazóval szemben azzal érvényesíthet, ha bemutatja az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot. Ebben az esetben a szerződést megkötöttnek kell tekinteni. Felhívjuk figyelmét, hogy a számlát / blokkot és/vagy a lebélyegzett, kitöltött jótállási jegyet feltétlen őrizze meg, hogy kétséget kizáróan igazolni tudja a fogyasztói szerződés megkötését.
13. A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti.
14. Jótállási igény nem érvényesíthető a következő esetekben.
 - A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés, átírás, vagy valótlan adatok bejegyzése esetén, a jótállási jegy érvénytelen.
 - A használati utasítástól eltérő, nem rendeltetésszerű használat miatt bekövetkező hiba esetén a készülékért jótállást nem vállalunk.
 - Átalakítás, hibás vagy szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, elemi kár vagy egyéb nem gyártási eredetű meghibásodás esetén.
 - Nem vonatkozik a jótállás törött, repedt alkatrészekre vagy tartozékokra.
 - Nem a jótállási jegyen feltüntetett szerviz által a fogyasztási cikken végzett bármilyen beavatkozás esetén.

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A forgalmazó ezúton nyilatkozik, hogy az ANGELCARE® AC300 légzésfigyelő készülékek a CE nemzetközi jelzéssel vannak ellátva, mely jelzi, hogy a termékek megfelelnek a következő, forgalmazásához szükséges nemzetközi és magyar szabványelírásoknak és irányelveknek: RG-05-91150-1A

TERMÉK TÍPUSA: ANGELCARE® AC300 LÉGZÉSFIGYELŐ KÉSZÜLÉK	TERMÉK GYÁRTÁSI SOROZATKÓDJA:
VÁSÁRLÁS DÁTUMA:	ELADÓ SZERV BÉLYEGZŐJE, ALÁÍRÁS:

AZONNALI INTÉZKEDÉSEK CSECSEMŐKORI LÉGZÉSKIMARADÁS ESETÉN

Amennyiben a légzésfigyelő megszólal, azonnal ellenőrizze, hogy a riasztás valós-e. Téves riasztás esetén derítse fel ennek okát, változtasson a gyermek kiságykörülményein, vagy fokozza a készülék érzékenységét.

Riasztás esetén a következő életfunkciókat azonnal ellenőrizze gyermekénél: - a baba lélegzik-e; - van-e a csecsemőnek szívverése; - megfelelő-e a gyermek vérkeringése.

A légzés ellenőrzése a legegyszerűbb, a mellkas emelkedő-süllyedő mozgása szabad szemmel is könnyen látható, a gyermek arcához közel hajolva a száj- és orrnyílásnál légző hang (szuszogás) hallható. A csecsemő szívverését az ismert testpontokon lehet pulzus tapintással ellenőrizni, nyaki- vagy csukló- verőér esetén. A vérkeringés ellenőrzésének legegyszerűbb módja a baba arcszínének megvizsgálása. Egészséges keringés esetén a gyermek arcbőre rózsaszínű, megfelelő vérkeringés hiánya esetén a szín kékesszürke.


A három funkció mindegyike fontos, de a készülék riasztása a légzőmozgás kimaradását jelzi.

Amennyiben a gyermek nem lélegzik, azonnal hívja a mentőket a 104, vagy 112 telefonszámokon, és a következő ÉLETMENTŐ INTÉZKEDÉSEKET az életfunkciók ismételt beindulásáig, vagy a mentők kiérkezéséig a leírtak szerint végezze.

Ha a gyerek ...	Megfelelő SÜRGŐS intézkedések
...eszmeletlen ...nem lélegzik ...van pulzusa	Kicsit döntse hátra a baba fejét és azonnal kezdjük meg a mesterséges lélegeztetést, kb. 40-szer percenként. Ne alkalmazzon szívmasszázszt! Folytassuk a lélegeztetést addig, amíg a gyermek újra magától lélegzik, vagy amíg a mentők át nem veszik.
...eszmeletlen ...nem lélegzik ...nincs pulzusa	Kicsit döntse hátra a baba fejét és azonnal kezdjük meg a mesterséges lélegeztetést, 3 lélegeztetéssel. Utána alkalmazzon 15 szívmasszázszt, majd ismét 3 lélegeztetést. Csak akkor hagyja abba az intézkedéseket, ha a gyermek ismét maga lélegzik.

MESTERSÉGES LÉLEGEZTETÉS

1. Kicsit döntse hátra a baba fejét. Tegye az egyik kezét a baba homlokára, másik kezének két ujját az álla alá. Így döntse hátra a baba fejét. (a. kép) Ha lélegeztetéskor nem emelkedik a baba mellkasa, akkor azonnal ellenőrizze, hogy a megfelelő pozícióban van-e a baba feje. A leggyakoribb hiba a mesterséges lélegeztetéskor a nem megfelelő fejpozíció.

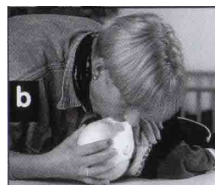

2. Száj és orr körülfárasztása
Tegye a száját a csecsemő orrára és szájára olyan szorosan, amennyire tudja. (b. kép)

Ha nem emelkedik a baba mellkasa, akkor ez abból is következhet, hogy valami elzárja a baba légcsövét. Szüntesse meg az akadályt, fordítsa oldalra a baba fejét és a kisebbik ujjával törölje ki a baba száját, majd fordítsa vissza a gyerek fejét az előző pozícióba és folytassa a lélegeztetést. (d. kép)



3. Három levegő befúvás
Annnyi levegőt fújjon a csecsemőnek, amennyit Ön egy könnyed levegővétellel a szájában tud tartani. A csecsemő mellkasa megemelkedik, amikor befújja a levegőt, és lesüllyed kilégzésnél. Egy befúvás kb. 1-1,5 másodpercig tart. A befúvások között a csecsemő orrát és száját szabadon kell hagyni, így önállóan bekövetkezik a kilégzés. A befúvás után fordítsuk fejünket oldalra úgy, hogy a gyermek légzésmozgását figyelhessük. (c. kép)

SZÍVMASSZÁZS

1. Feltételek

Ahhoz, hogy szívmasszázszt végezhesen, szilárd felületre van szükség. Egy asztal, vagy pelenkázó megfelel erre a célra, de ha nincs a közelben akkor a padló is alkalmas lehet. Nem szabad szívmasszázszt matracon végezni, mert az utórugózást eredményez. A következő lépésekhez, hogy a helyes nyomási pontot megtaláljuk, a gyermek felsőtestét szabaddá kell tenni.

2. Nyomási pont

Képzeld el egy összekötő vonalat a csecsemő két mellbimbója között. Jobb keze mutatóujját helyezze e vonal alá, és szorosan mellé a középső és gyűrűsujját. (a.kép) Emelje fel a mutatóujját és így a gyűrűs- és középső ujjával meg tudja nyomni a baba mellkasát. A gyűrűs- és középső uja így 0,5-1 cm-rel a mellbimbókat összekötő vonal alatt vannak.



3. 15 szívmasszázs

A mellkas csont nyomásával nyomást gyakorol a szívre is, amellyel egy szükségvérkeringést indít be, és ezzel eljut az oxigén a létfontosságú szervekhez. Ahhoz, hogy a szív az összenyomás után újra megtelhesen vérrrel, figyelni kell arra, hogy a mellkas csont ismét tehermentesítve legyen. Ekkor az ujját nem kell a mellkasról felemelni, mert elmozdulhat a helyes nyomási pontról. A nyomási mélység a mellkas-keresztmetszet egyharmada kell hogy legyen, ez csecsemők esetében kb. 2 cm. Ahhoz, hogy a szívmasszázs a normál szívizom összehúzódásának megfelelően, nem kell hirtelen nyomással végezni a szívmasszázszt, hanem finoman úgy, hogy a szív nyomása annyi ideig tartson, mint a szívizom elernyedése. (b. kép)

